



FSN

Képfeldolgozó rendszer

Használati utasítás

IPS4000

UHD moduláris videó mátrix kapcsoló és konverter

A termék csatlakoztatása, működtetése vagy beállítása előtt kérjük, figyelmesen és teljesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Magyar

Tartalomjegyzék

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat	3
Jelmagyarázat	4
Figyelmeztetések, óvintézkedések	5, 6
Biztonsági utasítások.	7-9
Elektromágneses kompatibilitás	10-14
Tartozékok	15
Mintakonfiguráció	16
Csatlakozások	17, 18
Üzemeltetés	19-28
Specifikáció.	29
Időzítés	30, 31
Géprajz	32
Tisztítási utasítások.	33

A jelen dokumentumban szereplő specifikációk és információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



A termék használati utasítása elektronikus formában is elérhető (eIFU). Több nyelv közül választhat. Az eIFU-k megtekintéséhez használja az Adobe Acrobat szoftvert. Az eIFU-khoz online hozzáférhet az fsnmed.com/support/eifu/ oldalon.

Termékleírás / Rendeltetésszerű használat



Az IPS4000 az orvosi képfeldolgozás és -vezérlés következő generációja. Az FSN kifejlesztett egy nagy teljesítményű, mégis kompakt digitális videointegrációs megoldást, amely kompatibilitást kínál a jelen és a jövő számára.

A 16 bemenetig és 32 kimenetig konfigurálható IPS4000 4096 x 2160 maximális felbontással, DisplayPort, HDMI, 12G-SDI és analóg jelopciókkal rendelkezik. A felhasználók elmenthetik és visszakereshetik az egyéni előbeállításokat, többféle ablakelrendezés közül választhatnak, beleértve a kettős (9 típus) és négyes (6 típus) elrendezést. Az irányítópult interfészvezérlő a beépített 7 hüvelykes képátlójú érintőképernyőn vagy egy külső képernyőn keresztül interneten, tableten vagy PC-n keresztül érhető el.

Rendeltetésszerű használat

Ez az eszköz más orvosi berendezésekhez való csatlakoztatásra szolgál. Ez az eszköz nem diagnosztikára szolgál. Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen más, rendkívül speciális sebészeti és diagnosztikai berendezésekkel, amelyeket sebészeti osztályokon, műtőkben, sürgősségi osztályokon és szakintézetekben használnak.

Rendeltetésszerű használat környezete

Ezt az eszközt képzett egészségügyi szakemberek által olyan egészségügyi intézményi környezetben történő használatra szánják, ahol a beteggel való érintkezés nem valószínű (nincsenek beteggel érintkező alkatrészek).

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy megfeleljen a betegközeli eszközökre vonatkozó egészségügyi biztonsági követelményeknek.




































Figyelmeztetés: Ez az eszköz nem használható életfenntartó berendezéssel együtt.

Javasolt alkalmazás

Ezt az eszközt képzett egészségügyi szakemberek használhatják. Ez az eszköz orvosi képkötő berendezésekhez csatlakoztatható, és segítségével a műtéti eljárások során képeket, videókat vagy beteginformációkat lehet megjeleníteni. Ez az eszköz nem diagnosztikára szolgál.

Jelmagyarázat

A terméken, annak címkéjén vagy a termék csomagolásán a következő szimbólumok láthatók. Minden egyes szimbólum az alábbiakban meghatározott sajátos jelentéssel bír:

	Veszélyes: Nagyfeszültség		Hálózati adapter		Tekintse át a kísérő dokumentumokat
	Egyenáram		Ekvipotenciális földelést jelöl		Egyedi eszközazonosító
	Védőföldelést jelöl		Fel-le irányt jelöl		Koreai tanúsítvány
	DC tápkapcsoló		Törékeny		A kínai kötelező tanúsítási szabályzatnak megfelelően jóváhagyva
	Szárazon tartandó		Rakásolható, maximum		Kínai RoHS címkék
	Lásd a használati utasítást		Gyártót jelöli		Katalógusszám
	Gyártás dátumát jelöli		Engedéllyel rendelkező képviselőt az Európai Közösségben		Orvosi eszköz
	Sorozatszám		Páratartalom-határ		Lásd a használati utasítást - elektronikus
	Hőmérsékleti határérték		A légköri nyomás határértéke		Importáló szervezet
	Brit megfelelőségi jelölés		Bekapcsolás		Kikapcsolni
	UK felelős személy				
	Az EU 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek és az alkalmazandó szabványoknak való megfelelés igazolását jelzi.				
	Az orvosi berendezés megfelel az ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) és a CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) szabványoknak az áramütés, a tűzveszély és a mechanikai veszélyek tekintetében.				
	A tesztek alapján megfelel az FCC B osztályú készülékekre vonatkozó előírásoknak (USA).				
	Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (2012/19/EU WEEE-irányelv). Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektronikai berendezések hulladékát nem szabad nem szelektált kommunális hulladékként elhelyezni, és külön kell gyűjteni. Kérjük, a készülék leszereléséhez forduljon a gyártóhoz vagy más, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító vállalathoz.				

Megjegyzés: A termékhez mellékeljük a kézikönyv angol nyelvű nyomtatott példányát. Az EU-tagállamokon belüli felhasználók más nyelvekért forduljanak a helyi forgalmazóhoz. Ez azokra az EU-tagállamokra vonatkozik, ahol a terméket engedélyezett csatornákon keresztül vásárolták.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Figyelmeztető információk



Ez a jel tájékoztatja a felhasználót, hogy a készülék működésével kapcsolatos fontos információkat mellékeltek. Ezért az esetleges problémák elkerülése érdekében gondosan olvassa el azokat.



Ez a jel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékben található szigetetlen feszültség értéke elég nagy lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon. Ezért a készülék belsejében lévő bármely alkatrész érintése veszélyes. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében NE távolítsa el a fedelet (vagy a hátlapot). A készülékben nem találhatóak a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízva szakképzett szervizszemélyzetre.

Tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne használja a készülék polarizált csatlakozóját hosszabbító vagy más aljzatokkal, amennyiben a villák nem illeszthetők be teljesen.



Az Underwriters Laboratories (UL) besorolása:

UL biztonsági megfelelés:

Ez az eszköz ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS MECHANIKAI VESZÉLYEK TEKINTETÉBEN U.L. minősítéssel rendelkezik KIZÁRÓLAG AZ UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 601.1 szerint.



EU-megfelelés és EMC-megfelelés:

Ez az eszköz megfelel az EN60601-1 és EN60601-1-2 szabvány követelményeinek, így megfelel az EU orvostechikai eszközökről szóló rendeletének (MDR 2017/745). CE I. osztályú orvostechikai eszköz tartozéka.

Csak az Egyesült Államokban használjon 120 V-os 5-15P típusú csatlakozót.

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel az Ön földrajzi területén előírt megfelelő típusú. Ez az eszköz univerzális tápegységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a 100-120 V AC vagy 200-240 V AC feszültségű területeken történő működést (nincs szükség felhasználói beállításra).

Használja a megfelelő tápkábelt a megfelelő típusú csatlakozódugóval. Ha a tápforrás 120 V AC, akkor használjon kórházi minőségű tápkábelt NEMA 5-15 típusú dugóval, 125 V AC jelöléssel, UL és C-UL jóváhagyással. Ha a tápforrás 240 V AC tápegység, használjon tandem (T-késes) típusú csatlakozódugót földelt tápkábellel, amely megfelel az adott európai ország biztonsági előírásainak.



Újrahasznosítás (2012/19/EU WEEE-irányelv)

A berendezés újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatban tartsa be a helyi rendeleteket és újrahasznosítási terveket.

Figyelmeztetés: Kerülni kell ennek a berendezésnek más berendezés mellett vagy arra helyezve történő használatát, mert ez rendellenes működéshez vezethet. Ha ilyen módon történő használatra van szükség, ezt a berendezést és a másik berendezést meg kell figyelni, hogy ellenőrizték, hogy megfelelően működnek-e.

Figyelmeztetés: A nem a berendezés gyártója által megjelölt vagy biztosított tartozékok, tranzistorok és kábelek használata fokozott elektromágneses kibocsátást vagy csökkent elektromágneses zavartűrést eredményezhet, és helytelen működéshez vezethet.

Figyelmeztetés: A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket (beleértve a perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad az eszköz bármely részéhez – beleértve a gyártó által előírt kábeleket is – 30 cm-nél közelebb használni. Ellenkező esetben a készülék teljesítményének romlása következhet be.

Figyelmeztetés: A készülék röntgen- vagy mágneses rezonanciás környezetben történő használata a készülék teljesítményének romlásához, más berendezések zavarásához vagy a rádiószolgáltatás zavarásához vezethet.

Figyelmeztetés: A megjelöltektől eltérő kábelek és/vagy egyéb tartozékok használata ezzel a készülékkel kibocsátásnövekedést vagy a zavartűrés csökkenését eredményezheti.

Figyelmeztetés: Ez a termék nem tekinthető HF (nagyfrekvenciás) elektrosebészeti berendezésekhez való csatlakoztatásra alkalmasnak.

Figyelmeztetés: Nem alkalmas gyúlékony anesztetikumok oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal alkotott keveréke jelenlétében történő használatra.

Biztonsági utasítások

Biztonság

1. Mielőtt az AC tápkábelt csatlakoztatná a DC adapter kimenetéhez, győződjön meg arról, hogy az egyenáramú (DC) adapter feszültségjelzése megfelel a helyi elektromos hálózatnak.
2. Soha ne helyezzen semmilyen fémből készült tárgyat az eszköz házának nyílásaiba. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
3. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a fedelet. A készülékben nem található a felhasználó által javítható alkatrészek. Az eszköz burkolatát csak szakképzett szakember nyithatja fel.
4. Soha ne használja az eszközt, ha a tápkábel megsérült. Ne tegyen semmit a tápkábelre, és tartsa távol a vezetéket azoktól a helyektől, ahol az emberek megbotolhatnak benne.
5. Amikor az eszköz tápkábelét kihúzza az elektromos aljzatból, ügyeljen arra, hogy ne a kábelt, hanem a dugót fogja meg.
6. Húzza ki az eszköz tápkábelét, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
7. Minden karbantartás előtt húzza ki az eszköz tápkábelét a hálózati csatlakozóból.
8. Ha az eszköz nem működik rendesen, különösen, ha szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és forduljon a hivatalos forgalmazóhoz vagy szervizközpontjához.
9. Kérjük, forduljon a gyártóhoz, ha a készüléket nehezen hozzáférhető helyre kell telepíteni.

Figyelmeztetés: Ne érintse meg egyszerre a bemeneti vagy kimeneti csatlakozókat és a beteget.

Figyelmeztetés: Ez az eszköz olyan bemeneti/kimeneti jelekhez és egyéb csatlakozókhoz való csatlakoztatásra szolgál, amelyek megfelelnek a vonatkozó IEC szabványnak (pl. az informatikai berendezésekre vonatkozó IEC60950 szabványnak és az orvosi elektromos berendezésekre vonatkozó IEC60601 szabványsorozatnak). Ezenkívül minden ilyen kombinált rendszernek meg kell felelnie az orvosi elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági követelményekről szóló IEC 60601-1-1 szabványnak, illetve az IEC 60601-1 szabvány 3. kiadása 16. pontjának. Bármely személy, aki kombinált rendszert alakított ki, felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-1 szabványban, illetve az IEC 60601-1 3. kiadásának 16. pontjában foglalt követelményeknek. Kétség esetén forduljon szakképzett szakemberhez vagy a helyi képviselőhöz.

Figyelmeztetés: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt az eszközt csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni. A tápegység (AC/DC adapter) az eszköz tartozéka. A berendezést úgy helyezze el, hogy a tápkábel dugóját ne legyen nehéz kihúzni a készülék bemenetéből.

Figyelmeztetés: Ne módosítsa ezt a berendezést a gyártó engedélye nélkül.

A készülékben található biztosíték kisebb megszakítóképességgel rendelkezik. Ne telepítse az épület elektromos hálózatába, ha a várható rövidzárlati áram meghaladja a 35 A-t.

Az üzemeltetés és tárolás környezeti feltételei

Hőmérséklet-tartomány 0 °C és 40 °C között (működés), -20 °C és 60 °C között (tárolás)
Relatív páratartalom-tartomány 10% és 85% között
Légköri nyomás 500 és 1060 hPa közötti tartományban.

Telepítés

1. Az eszköz házán lévő nyílások a szellőztetéshez lettek kialakítva. A túlmelegedés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni. Ha az eszközt könyvszekrénybe vagy más zárt helyre helyezi, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
2. Ne tegye ki az eszközt esőnek, és ne használja víz közelében. Ha az eszköz véletlenül vizes lesz, húzza ki a hálózathoz, és azonnal forduljon hivatalos szakkereskedőhöz. Szükség esetén nedves ruhával megtisztíthatja az eszközt, de előtte mindenképpen húzza ki azt a hálózathoz.
3. Helyezze az eszközt egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozó közelébe.
4. A magas hőmérséklet problémákat okozhat. A maximális működési hőmérséklet 40 °C. Ne használja az eszközt közvetlen napfényben, és tartsa távol a fűtőtestektől, kályháktól, kandallóktól és hőforrásoktól.
5. Mindig csak az eredeti kábeleket és tartozékokat használja a készülékkel.

Javítás

Ne próbálja meg saját maga megjavítani az eszközt, mivel a burkolatok felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát, és elveszíti a garanciát. Minden javítást bízson szakképzett szervizszemélyzetre. Húzza ki az eszközt az áramforrásból, és a következő esetekben forduljon szakképzett személyzethez:

- Ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy kopott.
- Ha folyadék került az eszközbe.
- Ha tárgyak estek az eszközbe.
- Ha az eszköz esőnek vagy nedvességnek volt kitéve.
- Ha az eszközt leejtés következtében erős ütés érte.
- Ha a készülékház megsérült.
- Ha az eszköz túlmelegedni látszik.
- Ha az eszköz füstöt vagy rendellenes szagot bocsát ki.
- Ha az eszköz nem a használati utasításnak megfelelően működik.

Biológiai veszélyek

A fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében ezt a készüléket csak olyan környezetben szabad használni, ahol a biológiai fertőtlenítés sikeresen elvégezhető.

Visszaküldött termék

A hibaelhárítás után, ha a problémák továbbra is fennállnak, fertőtlenítsé az eszközt, és az eredeti csomagolásban küldje vissza az FSN részére. A visszaküldött eszközökhöz csatolja a termékhez mellékelt tartozékokat. Kérjük, csatolja a hiba rövid magyarázatát.

A készülék visszaküldése előtt lépjen kapcsolatba az FSN Medical Technologies vállalattal a visszaküldési engedélyszámmal és az útmutatásokkal kapcsolatban.

Tartozékok

Csak a gyártó által meghatározott vagy az eszközzel együtt értékesített tartozékokat használjon.

Biztonsági megfelelés szerinti besorolás

- Áramütés elleni védelem: I. osztály, beleértve az AC/DC adaptert is. Az orvosi berendezés megfelel az ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) és a CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) szabványoknak az áramütés, a tűzveszély és a mechanikai veszélyek tekintetében.
- Beteggel érintkező alkatrészek: Nincsenek beteggel érintkező alkatrészek.
- Biztonsági szint gyúlékony anesztetikumok levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal alkotott keveréke jelenlétében. Nem alkalmas gyúlékony anesztetikumok oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal alkotott keveréke jelenlétében történő használatra.
- Kritikus alkalmazások esetén ajánlott egy csereeszköz rendelkezésre állása.
- Működési mód: Folyamatos.

Tájékoztató a felhasználó számára:

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A változásokkal és új termékekkel kapcsolatos információkért forduljon az FSN Medical Technologies helyi értékesítési képviselőjéhez.

Elektromágneses kompatibilitás

Ezt a készüléket úgy tervezték és tesztelték, hogy megfeleljen az IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 szabvány más eszközökkel való elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó követelményeinek. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása érdekében az eszközt a jelen használati utasításban található EMC információknak megfelelően kell telepíteni és üzemeltetni.

Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak az interferenciával szemben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor zavarhatja más rádiókommunikációs berendezések működését. Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételben, a felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több elvégzésével megszüntetni:

1. Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
2. Növelje a távolságot az eszköz és az interferenciának kitett tárgy között.
3. Csatlakoztassa az eszközt egy olyan konnektorhoz, amely más elektromos áramkörön van, mint amelyhez az interferenciának kitett tárgy csatlakozik.
4. Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/tévészerezelőhöz segítségért.

TÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részében leírtaknak. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

FCC FIGYELMEZTETÉS

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát termel vagy használ. Az eszközön végzett változtatások vagy módosítások káros interferenciát okozhatnak, kivéve, ha a módosításokat a használati utasításban kifejezetten jóváhagyták. A felhasználó engedély nélküli változtatás vagy módosítás esetén elveszítheti a készülék működtetésére való jogosultságát.

TERMÉK ÉLETTARTAMA

Az eszköz teljesítménye hosszú idő alatt romolhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e. A készülék várható élettartama négy év. Tartsa tisztán az eszközt, hogy meghosszabbítsa a működési élettartamát.

1. Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátás

Az eszközt az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. Az eszköz használatjának kell gondoskodnia arról, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.		
Kibocsátási vizsgálat	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet - útmutatás
CISPR 11 rádiófrekvencia-kibocsátás	1. csoport	A készülék sugárzási jellemzői lehetővé teszik az ipari és kórházi felhasználást (CISPR 11, A osztály). Lakóterületen történő használat esetén (amelyhez a CISPR 11 általában B osztályt ír elő) ez a készülék nem biztos, hogy megfelelő védelmet nyújt a rádiós szolgáltatások számára. A használatnak szükség esetén korrekciós intézkedéseket kell tennie, mint például a készülék áthelyezése vagy átállítása.
CISPR 11 rádiófrekvencia-kibocsátás	B osztály	
Harmonikus kibocsátások IEC 61000-3-2	A osztály	
Feszültségingadozások/feszültségzavargások IEC 61000-3-3	Megfelel	

2. Gyógyászati villamos készülékek használata professzionális egészségügyi intézményekben.

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses zavartűrés

Az eszközt az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. Az eszköz használatjának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.		
Zavartűrés-vizsgálat	IEC 60601-1-2:2014 szerinti megfeleléségi szint	Elektromágneses környezet - útmutatás
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	Megfelel ± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV, ± 8 kV érintkező ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV levegő	A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie.
Gyors elektromos tranziens/lökés IEC 61000-4-4	Megfelel ± 2 kV hálózati áramellátó vezeték esetében ± 1 kV bemeneti/kimeneti vezeték esetében	A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen.
Túlfeszültség IEC 61000-4-5	Megfelel ± 1 kV kiegyensúlyozott feszültség ± 2 kV közös módusú feszültség	A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen.
Feszültségesés, rövid kimaradás és feszültségváltozás a hálózati feszültségben IEC 61000-4-11	0% U_T^* ; 0,5 ciklus 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° értéknél 0% U_T ; 1 ciklus és 70% U_T ; 25/30 ciklus Egy fázis: 0° értéknél 0% U_T ; 250/300 ciklus	A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. Ha a készülék használója a hálózati feszültség kimaradása esetén is igényli a készülék folyamatos működését, akkor szünetmentes tápegység használata javasolt.
*Megjegyzés: Az U_T a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt.		


3. Gyógyászati villamos készülékek használata professzionális egészségügyi intézményekben.

Vizsgálati előírás a BURKOLAT PORTJÁNAK rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs berendezésekkel szembeni ZAVARTŰRÉSÉRE (az IEC 60601-1-2:2014 szabvány szerint)

Az eszközt az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. Az eszköz használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.						
Tesztfrekvencia (MHz)	Sáv (MHz)	Szolgáltatás	Moduláció	Maximális teljesítmény (W)	Távolság (m)	ZAVARTŰRÉSI TESZTELÉSI SZINT (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Impulzusmoduláció 18 Hz	1,8	1,0	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ± 5 kHz eltérés ± 1 kHz szinusz	2	1,0	28
710	704-787	Sáv 13, 17	Impulzusmoduláció 217 Hz	0,2	1,0	9
745						
780						
810	800-960	GSM 800/900 TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE sáv 5	Impulzusmoduláció 18 Hz	2	1,0	28
870						
930						
1720	1700-1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE sáv 1,3, 4, 25 UMTS	Impulzusmoduláció 217 Hz	2	1,0	28
1845						
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE sáv 7,	Impulzusmoduláció 217 Hz	2	1,0	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Impulzusmoduláció 217 Hz	0,2	1,0	9
5500						
5785						

*Megjegyzés: Ha a ZAVARTŰRÉSI TESZTELÉSI SZINT eléréséhez szükséges, az adóantenna és az eszköz közötti távolság 1 m-re csökkenthető. Az 1 m-es vizsgálati távolságot az IEC 61000-4-3 szabvány megengedi.

4. Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavarűrés – nem életfenntartó berendezések és rendszerek esetében

Az eszközt az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. Az eszköz használojának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.			
Zavartűrés-vizsgálatok	IEC 60601-1-2:2014 vizsgálatai szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – útmutatás
<p>Vezetett rádiófrekvencia (RF) IEC 61000-4-6</p> <p>Sugárzott rádiófrekvencia (RF) IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V rms 150 kHz- 80 MHz</p> <p>3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz</p>	<p>3 Veff</p> <p>3 V/m</p>	<p>Az eszköz bármely részétől – beleértve a kábeleket is – mért, az adóberendezés frekvenciájára vonatkozó képlet alapján kiszámított ajánlott védőtávolságon belül nem szabad hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülékeket használni.</p> <p>Ajánlott védőtávolság:</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>Ahol P az adó gyártó által megadott névleges teljesítménye Wattban [W] és d a javasolt védőtávolság méterben [m].</p> <p>A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses helyszínelmérése a során megállapított elektromágneses télerősségének minden frekvenciatartományban kisebbnek kell lennie a b határértéknél.</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$ <p>80 MHz-800 MHz</p> $d = 2,3 \sqrt{P}$ <p>800 MHz-2,5 GHz</p> <p>A következő szimbólummal ellátott berendezések közelében interferencia léphet fel:</p> 
<p>Megjegyzés: Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.</p>			
<p>a A helyhez kötött adók, például a rádió- [mobil/vezeték nélküli] telefon-bázisállomások, valamint a műholdas, amatőr, AM és FM rádió-műsorszórás és a tv-műsorszórás elektromágneses télerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses környezetének értékeléséhez célszerű elektromágneses helyszínelmérést végezni. Ha a készülék használati helyén mért télerősség meghaladja a fenti megfeleléségi határértékeket, akkor ellenőrizni kell, hogy a készülék képes-e a normál működésre. Rendellenes működés észlelése esetén további intézkedésekre lehet szükség, például a készüléket más irányba kell állítani vagy át kell helyezni.</p> <p>b A 150 kHz–80 MHz-es frekvenciatartomány felett az elektromágneses télerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.</p>			


5. A hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és az eszköz közötti javasolt védőtávolságok

Az eszközt olyan elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, ahol a rádiófrekvenciás zavarás kontrollált. A készülék használója úgy segíthet az elektromágneses interferencia megelőzésében, ha betartja a készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) közötti alábbi (a kommunikációs eszköz maximális kimeneti teljesítményének megfelelő) minimális távolságot.

Az adó névleges teljesítménye [W]	Védőtávolság az adó frekvenciájának függvényében [m]		
	150 kHz-80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz-800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz-2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

A fenti felsorolásban nem szereplő maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a javasolt **d** védőtávolság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel becsülhető meg, ahol a **P** az adó gyártó által megadott legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W).

Tartozékok IPS4000

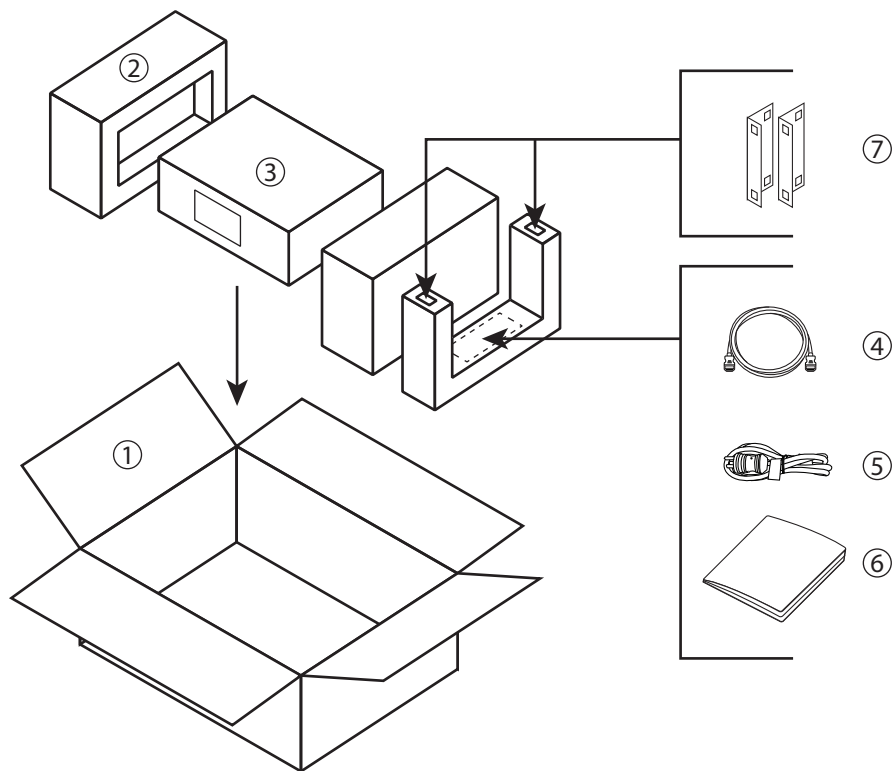

Sorszám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség
1	Kartondoboz	1
2	Hungarocell	3
3	IPS4000 készülék	1
4	HDMI kábel	1
5	AC hálózati kábel (1,83 m, orvosi minőségű)	1
6	Használati utasítás	1
7	Tartókonzol	2

IPS4000 Minta rendszerkonfiguráció

Bemenet



Akár 4096 x 2160 felbontás.
Akár 16 bemenet, 32 kimenet.

HDMI 2.0

DP 1.2



12G SDI

Analóg (opció)

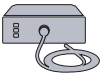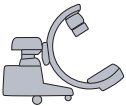

Kimenet

Többablakos elrendezés
Streamelés

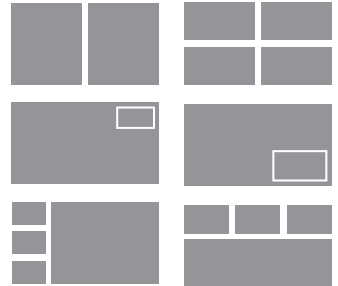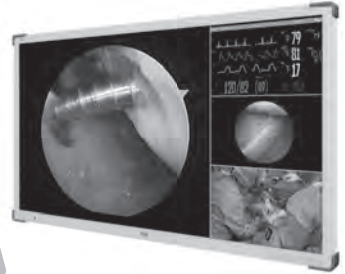

Többablakos elrendezési opciók

IPS4000

Interfészvezérlés

Az irányítópult a beépített 7 hüvelykes képátlójú érintőképernyőn vagy egy külső érintőképernyőn vagy tableten keresztül érhető el.



Csatlakozások

Az IPS4000 moduláris konfigurációt tesz lehetővé. Gyárilag a bemeneti és kimeneti kártyák különböző kombinációi állíthatók össze. Nem minden IPS4000 készülék néz ki egyformán.

Az alábbiakban az IPS4000 bemeneti és kimeneti kártyák és egyedi funkcióik leírása következik.

4 portos HDMI bemeneti kártya Elnevezés: HDIN	
4 portos DisplayPort bemeneti kártya Elnevezés: DPIN	
Dual HDMI, dual DisplayPort bemeneti kártya Elnevezés: DHIN	
Analog bemeneti kártya Elnevezés: ANIN	
12G SDI bemeneti kártya Elnevezés: SDIN	

4 portos HDMI kimeneti kártya Elnevezés: HQOUT	
4 portos DisplayPort kimeneti kártya Elnevezés: DQOUT	
HDMI (skálázható)* kimeneti kártya Elnevezés: HDOUT	
DisplayPort (skálázható)* kimeneti kártya Elnevezés: DPOUT	
12G SDI (skálázható)* kimeneti kártya Elnevezés: SDOUT	

* Skálázott kimenet Beállíthatók a felbontás, az ablakelrendezés, a zoom, a pásztázás funkciók.


Bemenet

Kimenet


Kimenet

Legfeljebb 4 bemeneti csatlakozóhely áll rendelkezésre

Legfeljebb 8 kimeneti csatlakozóhely áll rendelkezésre

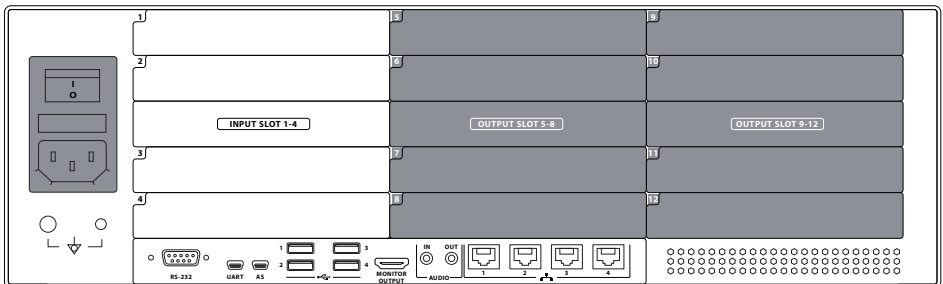


Csatlakozások

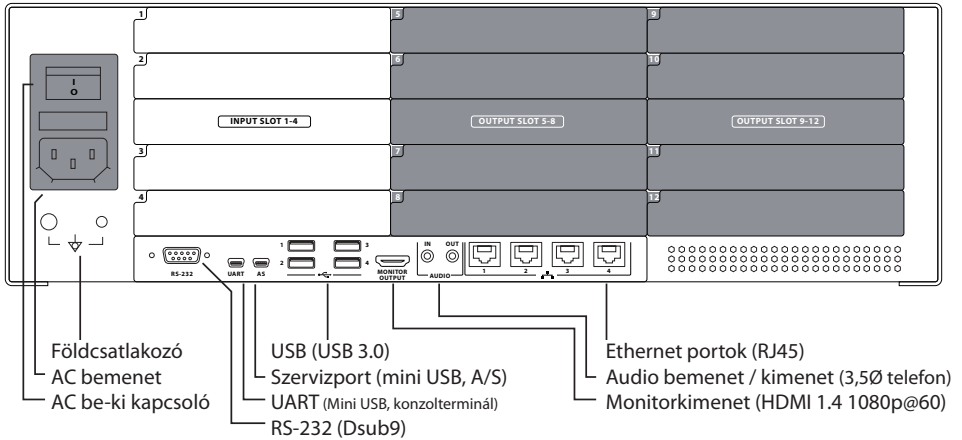


Sorszám	Megnevezés
Földcsatlakozó	Közvetlen fizikai csatlakozó a földeléshez vagy földhöz.
USB	Billentyűzet, egér vagy memóriakártya csatlakoztatása, illetve firmwarefrissítés.
Szervizport	Gyári használatra.
UART	Más eszközökkel való soros kommunikációhoz használható.
RS-232	Más eszközökkel való soros kommunikációhoz használható.
Monitorkimenet	Egy külső web- vagy PC-képernyő csatlakoztatása a kezelőfelület megtekintéséhez és vezérléséhez.
Ethernet portok	Hálózati streameléshez.
Audio bemenet Audio kimenet (nem használt)	Audio csatlakoztatása.

Tápegység csatlakoztatása


Csak a megjelölt csatlakozót és feszültséget használja. A hálózati követelmények a következők: AC 100~240V / 50~60Hz, 2A(max). Használja a mellékelt 1,83 m hosszú, kórházi minőségű váltakozó áramú tápkábelt. A nem megfelelő tápellátás áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt a berendezést csak védőföldeléssel ellátott tápegységhez szabad csatlakoztatni.

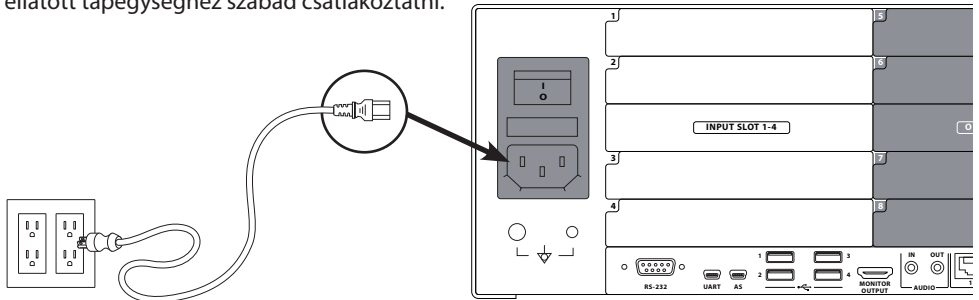

Az IPS4000 elindítása

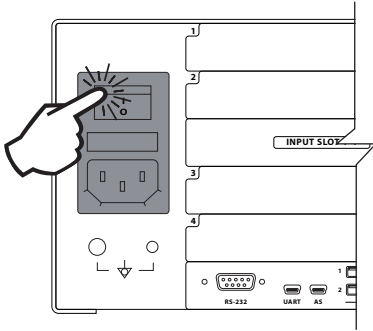

1. Kapcsolja be a tápellátást az IPS4000 hátoldalán található AC kapcsolóval.

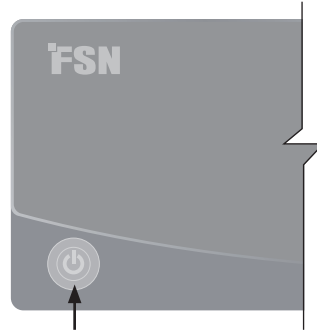


2. Az előlapon lévő bekapcsológomb zöld színnel világít.



3. Az IPS4000 bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A zöld fény villogni fog az inicializálás alatt, majd elsötétül, amikor a rendszer készen áll.

Az IPS4000 kikapcsolása

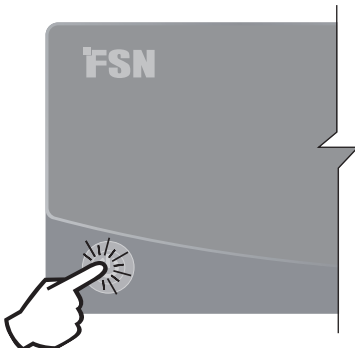


Nyomja meg a bekapcsológombot, és megjelenik egy párbeszédpanel.

Nyomja meg a **Power Off** (Kikapcsolás) vagy a **Cancel** (Mégse) gombot. A kikapcsolás után a zöld fény világítani fog, ha csak nem kapcsolja le a készüléket az IPS 4000 hátoldalán.

Irányítópult

Az IPS4000 beüzemelése után az interfészvezérlő irányítópult megjelenik a beépített 7 hüvelykes képtáblájú érintőképernyőn vagy egy csatlakoztatott külső képernyőn (tableten vagy PC-n).

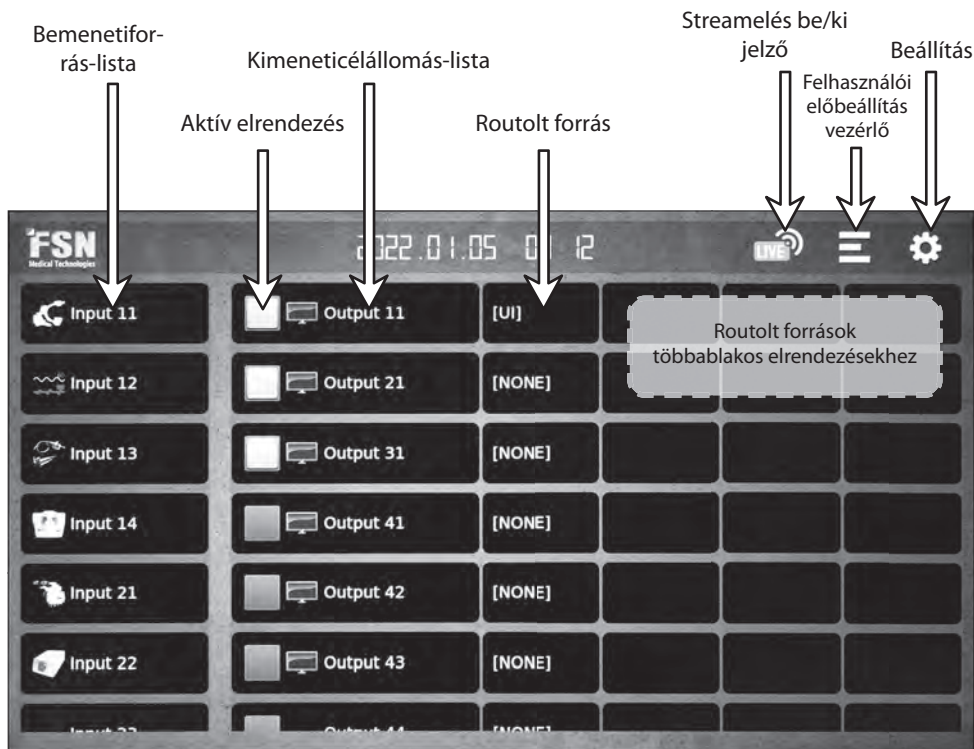

Húzza felfelé vagy lefelé az irányítópulton lévő bármely lista további részének megjelenítéséhez.

Irányítópult - routolás



Aktív forrás




1. lépés

Koppintson egy aktív forrásra a bemenetiforrás-listából.

2. lépés



Koppintson egy célállomásra a kimeneticélállomás-listából. Továbbtódik a jel.

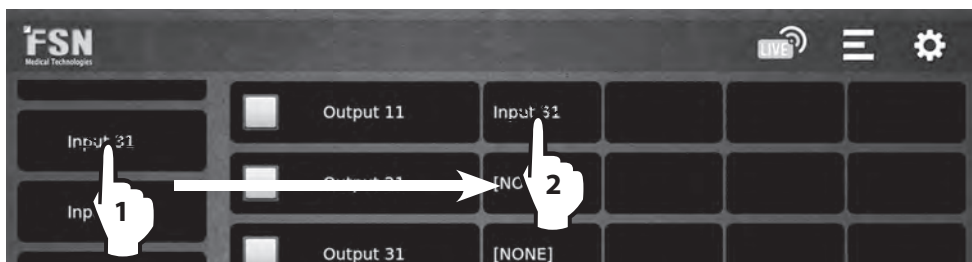

Másfelől a routolás úgy is megvalósítható, hogy először kiválaszt egy kimeneti célállomást az irányítópulton, majd kiválaszt egy bemeneti forrást.

Irányítópult - routolás, több ablak

Többablakos elrendezés esetén akár négy aktív forrást is routolhat ugyanarra a kimeneti célállomásra.

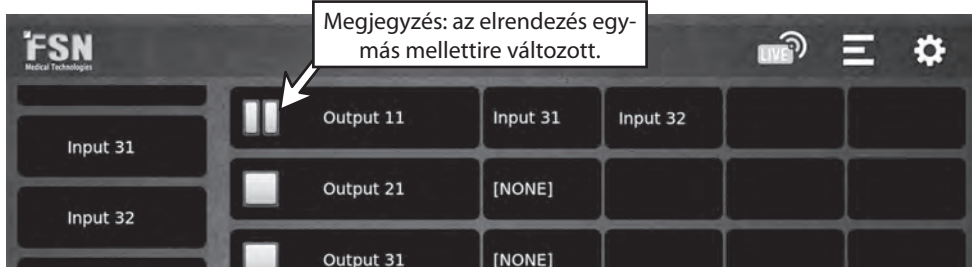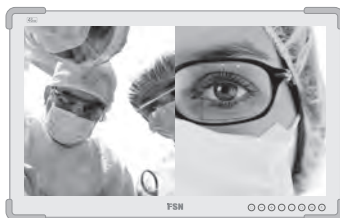

Bemeneti konfigurációk

Az irányítópulton nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik forrást a bemeneti konfigurációs képernyő megjelenítéséhez.



Állítsa be az egyes bemeneti forrásokat a kívánt módon. A módosítások azonnal megtörténnék.

Elnevezés módosítása

Ha kész, válassza az Exit gombot.

Input Name
Input 11

EXIT
Slot-1, Port-1

Input Color Settings

CONTRAST	BRIGHTNESS	SHARPNESS	RED	GREEN	BLUE	GAMMA	RANGE
50	50	5	128	128	128	BYPASS	AUTO

Input Icons

Ikon hozzáadása egy forráshoz

Beállítás kiválasztása a színbeállítások elvégzéséhez

Színbeállítások visszaállítása a gyári alapértelmezettre

The screenshot shows the configuration screen for 'Input 11'. At the top, there is a text field labeled 'Input Name' containing 'Input 11'. To the right is an 'EXIT' button. Below this is the 'Input Color Settings' section, which contains a table with columns for CONTRAST, BRIGHTNESS, SHARPNESS, RED, GREEN, BLUE, GAMMA, and RANGE. The values are 50, 50, 5, 128, 128, 128, BYPASS, and AUTO respectively. Below the table is the 'Input Icons' section, which shows a row of icons for different input sources. Arrows point from the text labels to the corresponding elements in the screenshot: 'Elnevezés módosítása' points to the 'Input Name' field, 'Ha kész, válassza az Exit gombot.' points to the 'EXIT' button, 'Ikon hozzáadása egy forráshoz' points to the first icon in the 'Input Icons' row, 'Beállítás kiválasztása a színbeállítások elvégzéséhez' points to the 'GREEN' column in the 'Input Color Settings' table, and 'Színbeállítások visszaállítása a gyári alapértelmezettre' points to a refresh icon on the right side of the 'Input Color Settings' section.

Kimeneti elrendezés


Az irányítópulton válassza az elrendezés ikont a kimeneti elrendezési lehetőségek megjelenítéséhez.



Ha az elrendezés ikon szürke, ez azt jelzi, hogy a többablakos elrendezések nem állnak rendelkezésre (nem skálázott kimeneti panel).



Válassza ki a kívánt kimeneti elrendezést. A módosítások azonnal megtörténnék.

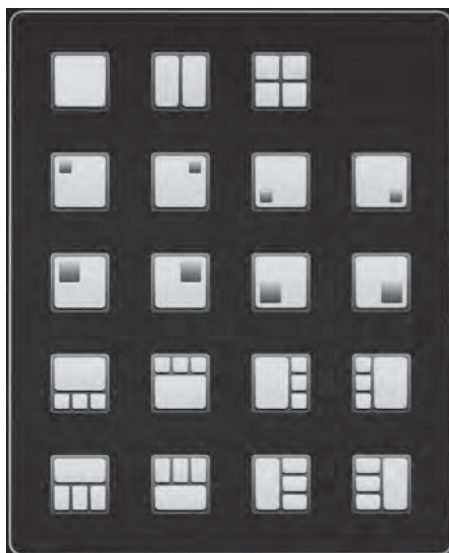

Kimeneti konfigurációk

Az irányítópulton nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik kimeneti célállomást a kimeneti konfigurációs képernyő megjelenítéséhez.



Konfigurálja az egyes kimeneti célállomásokat a kívánt módon. A módosítások azonnal megtörténnének.



Elnevezés módosítása

Ha kész, válassza az Exit gombot.

Ikon hozzáadása egy célállomáshoz

Válasszon ki egy kimeneti felbontási beállítást.

Nem skálázott kimeneti panel használata esetén (szürke kimeneti elrendezés ikon) a felbontási beállítások nem elérhetők.


Routolt forráskonfigurációk

Az irányítópulton nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik routolt forrást a konfigurációs képernyő megjelenítéséhez.



Ha az elrendezés ikon szürke, ez azt jelzi, hogy a routolt forráskonfigurációk nem állnak rendelkezésre (nem skálázott kimeneti panel).


Konfigurálja a pásztázást (panning), a zoomot és a képarányt (Aspect ratio) a kívánt módon. A módosítások azonnal megtörténnék.

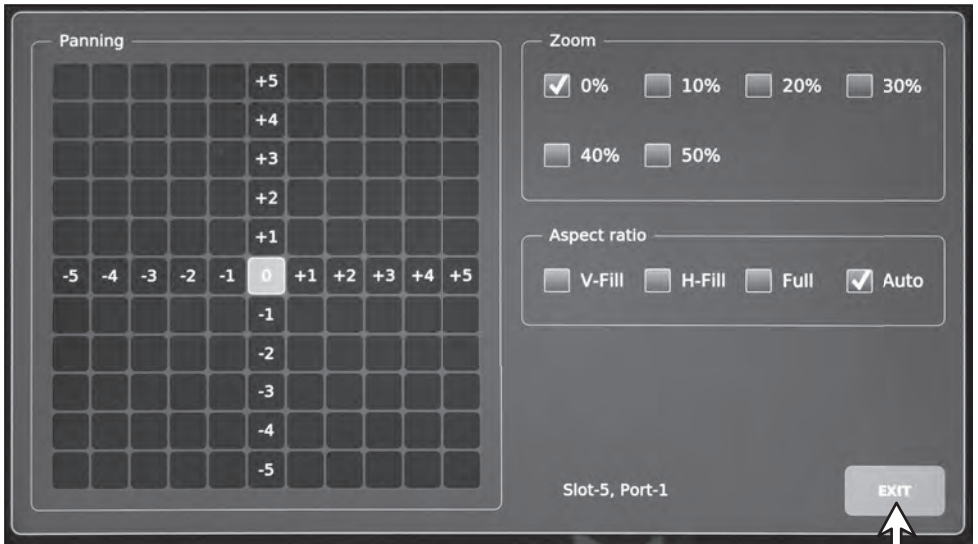



Ha kész, válassza az Exit gombot.

Beállítás

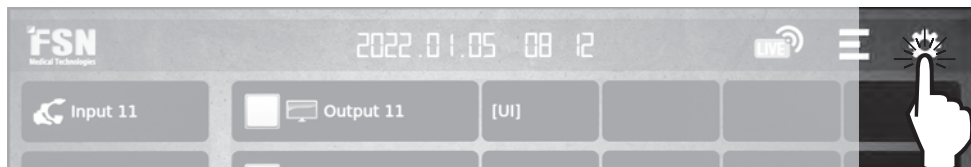
Az irányítópulton válassza a beállítás ikont. A beállítás jelszóval védett. A kezdeti jelszó 0000.



A beállítási képernyő fülek az alábbiakban ismertetett funkciókat vezérlik.

INPUT SLOT 1-4 - Bemeneti csatlakozóhely panelek beállítása. Válassza a  lehetőséget a portok sorrendjének beállításához.	OUTPUT SLOT 5-12 - Kimeneti csatlakozóhely panelek beállítása. Válassza a  lehetőséget a portok sorrendjének beállításához.	NETWORK - Hálózati címek, kiszolgálók és egyéb konfigurációk beállítása.
STREAMING - Csatornák, hitelesítés, portok, bitráta és kodekek beállítása.	GENERAL - Jelszó és idő beállítása, funkciók megjelenítése vagy elrejtése, kimeneti helyek azonosítása, mentett beállítások exportálása vagy importálása.	VERSION - Firmware megjelenítése és frissítése, jellemzően USB-pendrivel segítségével.

Alkalmazás Kilépés

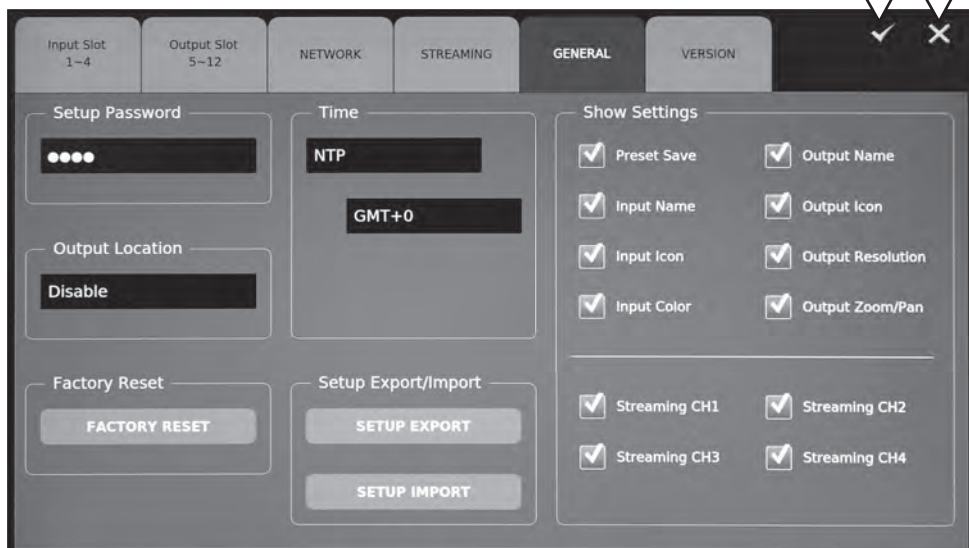

Streamelés

Az irányítópulton válassza a streaming ikonját a streaming funkciók engedélyezéséhez vagy letiltásához.



Csatlakozás egy streaming szerverhez, például a VLC médialejátszóhoz.

1. A stream PC-n történő lejátszásához telepítse a VLC médialejátszót.
2. Indítsa el a VLC médialejátszót.
3. Kattintson a „Media” fülre, és válassza az „Open Network Stream” lehetőséget.
4. Írja be a hálózati URL-t a streaming protokollnak megfelelően (RTSP, RTMP, HLS, Multicast).



Csatlakozás RTSP streaming szerverhez.

1. A beállítás menü STREAMING fülén válassza ki a Protocol (Protokoll) mezőben az „RTSP” elemet a streamelni kívánt csatornához.
2. Írja be az RTSP URL-jét a VLC médialejátszóban az RTSP streaming szerverhez való csatlakozáshoz. (Formátum) `rtsp://felhasználónév:jelszó@IP-cím:RTSP port/csatorna neve`. (Példa) `rtsp://ips4000:ips4000@192.168.11.111:554/stream1`
3. Kattintson a Play (Lejátszás) gombra.

Csatlakozás RTMP streaming szerverhez.

1. A beállítás menü STREAMING fülén válassza ki a Protocol (Protokoll) mezőben az „RTMP” elemet a streamelni kívánt csatornához.
2. Írja be az RTMP URL-jét a VLC médialejátszóban az RTMP streaming szerverhez való csatlakozáshoz. (Formátum) `rtmp://IP-cím:RTMP port/csatorna neve?user=felhasználónév&pass=jelszó`. (Példa) `rtmp://192.168.11.111:1935/stream1?user=ips4000&pass=ips4000`
3. Kattintson a Play (Lejátszás) gombra.

Csatlakozás HLS streaming szerverhez.


1. A beállítás menü STREAMING fülén válassza ki a Protocol (Protokoll) mezőben az „HLS” elemet a streamelni kívánt csatornához.
2. Írja be a HLS URL-jét a VLC médialejátszóban a HLS streaming szerverhez való csatlakozáshoz. (Formátum) `https://IP-cím/csatorna neve?user=felhasználónév&pass=jelszó`. (Példa) `https://192.168.11.111/stream1?user=ips4000&pass=ips4000`
3. Kattintson a Play (Lejátszás) gombra.

Csatlakozás Multicast streaming szerverhez.

1. A beállítás menü STREAMING fülén válassza ki a Protocol (Protokoll) mezőben a „Multicast” elemet, és írja be a multicast IP-címet a Name (Név) mezőben a streamelni kívánt csatornához.
2. Írja be a multicast URL-jét a VLC médialejátszóban a multicast streaming szerverhez való csatlakozáshoz. (Formátum) `rtp://csatorna neve:Multicast port` (Példa) `rtp://224.0.0.1:5000`
3. Kattintson a Play (Lejátszás) gombra.

Előbeállítások

Az irányítópulton válassza a felhasználói előbeállítás ikonját az előbeállítások elnevezéséhez vagy a rendszerkonfigurációk mentéséhez és betöltéséhez.

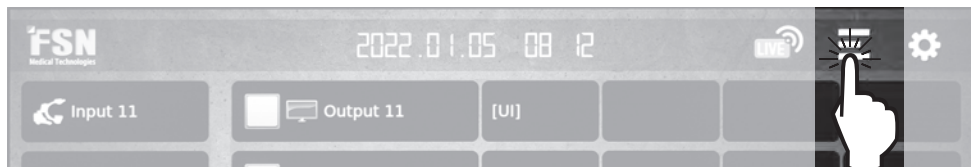

Az előbeállítás nevének módosításához válassza ki az előbeállítás nevét, szerkessze, majd nyomja meg az APPLY gombot.



Az IPS4000 aktuális konfigurációjának előbeállításaként történő mentéséhez válassza ki az előbeállítás ID/NAME-et (azonosító/név), és nyomja meg a SAVE (mentés) gombot. A rendszer elindul.

Egy elmentett előbeállítás visszakereséséhez válassza ki az előbeállítás ID/NAME-et (azonosító/név), és nyomja meg a LOAD (betöltés) gombot. A rendszer elindul.

Általános specifikációk

Sorszám	Megnevezés
Modell	IPS4000 moduláris videó mátrix kapcsoló és konverter
Bemeneti opciók	HDMI x 4, DP x 4, HDMI x 2 + DP x 2, CVBS x 2 +VGA (BNC) x 2, SDI x 2 + Thru Out x 2
Kimeneti opciók	HDMI + UART, DP + UART, HDMI x 4, DP x 4, SDI + UART
Soros kommunikáció	RS-232C
Hálózat	Ethernet TCP/IP
OSD nyelve	Magyar
Tápellátás	AC 100~240V / 50~60Hz , 2A-1A
Megfelelőség és tanúsítványok	ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1:14, IEC/EN60601-1, FCC 15. rész B alrész, CE(EN60601-1-2,EN55011,EN61000-3-2/3), RoHS
A készülék mérete	437(SZ) x 140(MA) x 423(MÉ) mm 17,21(SZ) x 5,51(MA) x 16,65(MÉ) hüvelyk
A csomagolás mérete	520 (SZ) x 237 (MA) x 592 (MÉ) 20,47 (SZ) x 9,33 (MA) x 23,31 (MÉ)
Súly	10,7 kg, 23,59 font (IPS4000) 14 kg, 30,86 font (szállítási csomag)

Bemeneti/kimeneti jellemzők

Jel	Típus		Támogatott felbontás
Bemenet	HDMI	HDMI A	Akár 4096x2160 / 60 Hz
	DP	DisplayPort (20P)	Akár 4096x2160 / 60 Hz
	12G-SDI	BNC	Akár 3840x2160 / 60 Hz
	Analóg	VGA (BNC)	VGA akár 1920x1080 / 60 Hz CVBS: 480i, 576i
Kimenet	HDMI	HDMI A	1920x1080 / 50Hz 1920x1080 / 60Hz 3840x2160 / 50Hz 3840x2160 / 60Hz
	DP	DisplayPort (20P)	1920x1080 / 50Hz 1920x1080 / 60Hz 3840x2160 / 50Hz 3840x2160 / 60Hz
	12G-SDI	BNC	1920x1080 / 50Hz 1920x1080 / 60Hz 3840x2160 / 50Hz 3840x2160 / 60Hz

Standard bemeneti jel táblázat

Felbontás	Időztítési információ			Jelforrás				
	H-frekvencia (KHz)	V-frekvencia (Hz)	Óra (MHz)	HDMI	DP	SDI (12G)	CVBS	RGB
640 x 480	31,47	59,94	25,173	•	•			•
640 x 480	37,86	72,82	31,503	•	•			•
640 x 480	37,50	74,99	31,496	•	•			•
640 x 480	43,27	85,01	36,001	•	•			
800 x 600	35,16	56,25	36,000	•	•			•
800 x 600	37,88	60,32	40,000	•	•			•
800 x 600	48,08	72,19	50,000	•	•			•
800 x 600	46,88	75,00	49,500	•	•			•
800 x 600	53,67	85,06	56,250	•	•			
1024 x 768	48,36	60,00	65,000	•	•			•
1024 x 768	56,48	70,07	75,000	•	•			•
1024 x 768	60,02	75,03	78,750	•	•			•
1024 x 768	68,68	85,00	94,500	•	•			
1152 x 864	67,50	75,00	108,000	•	•			•
1280 x 720	44,76	60,00	74,486	•	•			•
1280 x 720	56,63	75,30	96,036	•	•			•
1280 x 720	58,63	84,84	117,500	•	•			
1280 x 960	60,02	60,02	108,043	•	•			•
1280 x 960	85,99	85,05	148,582	•	•			
1280 x 1024	63,98	60,02	108,500	•	•			•
1280 x 1024	79,98	75,03	135,000	•	•			•
1280 x 1024	91,15	85,02	157,500	•	•			
1600 x 1200	74,01	60,00	162,000	•	•			
1680 x 1050	64,67	59,88	119,000	•	•			•
1920 x 1200	74,04	59,95	154,000	•	•			
720 x 480i	15,74	59,94	13,500	•		•	•	•
720 x 576i	15,63	50,00	13,500	•		•	•	•
1280 x 720p	22,50	30,00	74,250	•	•	•		•
1280 x 720p	37,50	50,00	74,250	•	•	•		•
1280 x 720p	44,96	59,94	74,176	•	•	•		•
1280 x 720p	45,00	60,00	74,250	•	•	•		•
1920 x 1080i@50	28,13	50,00	74,250	•	•	•		•
1920 x 1080i@59,94	33,72	59,94	74,176	•	•	•		•
1920 x 1080p@25	28,13	25,00	74,250	•	•	•		•
1920 x 1080p@29	33,72	29,97	74,176	•	•	•		•


Standard bemeneti jel táblázat

Felbontás	Időztítési információ			Jelforrás				
	H-frekvencia (KHz)	V-frekvencia (Hz)	Óra (MHz)	HDMI	DP	SDI (12G)	CVBS	RGB
1920 x 1080p@30	33,75	30,00	74,250	•	•	•		•
1920 x 1080p@50	56,25	50,00	148,500	•	•	•		•
1920 x 1080p@59	67,43	59,94	148,352	•	•	•		•
1920 x 1080p@60	67,50	60,00	148,500	•	•	•		•
1920 x 2160	133,29	59,99	277,250	•	•	•		
3840 x 2160	67,50	30,00	297,00	•	•	•		
3840 x 2160	112,50	50,00	594,00	•	•	•		
3840 x 2160	134,87	59,94	593,41	•	•	•		
3840 x 2160	135,00	60,00	594,00	•	•	•		
4096 x 2160	67,50	30,00	297,00	•	•			
4096 x 2160	112,50	50,00	594,00	•	•			
4096 x 2160	134,87	59,94	593,41	•	•			
4096 x 2160	135,00	60,00	594,00	•	•			

Standard kimeneti jel táblázat

Felbontás	Időztítési információ			Jelforrás		
	H-frekvencia (KHz)	V-frekvencia (Hz)	Óra (MHz)	HDMI	DP	SDI (12G)
1920 x 1080p@50	56,25	50,00	148,500	•	•	•
1920 x 1080p@60	67,50	60,00	148,500	•	•	•
3840 x 2160@50	112,50	50,00	594,00	•	•	•
3840 x 2160@60	135,00	60,00	594,00	•	•	•

Géprajz

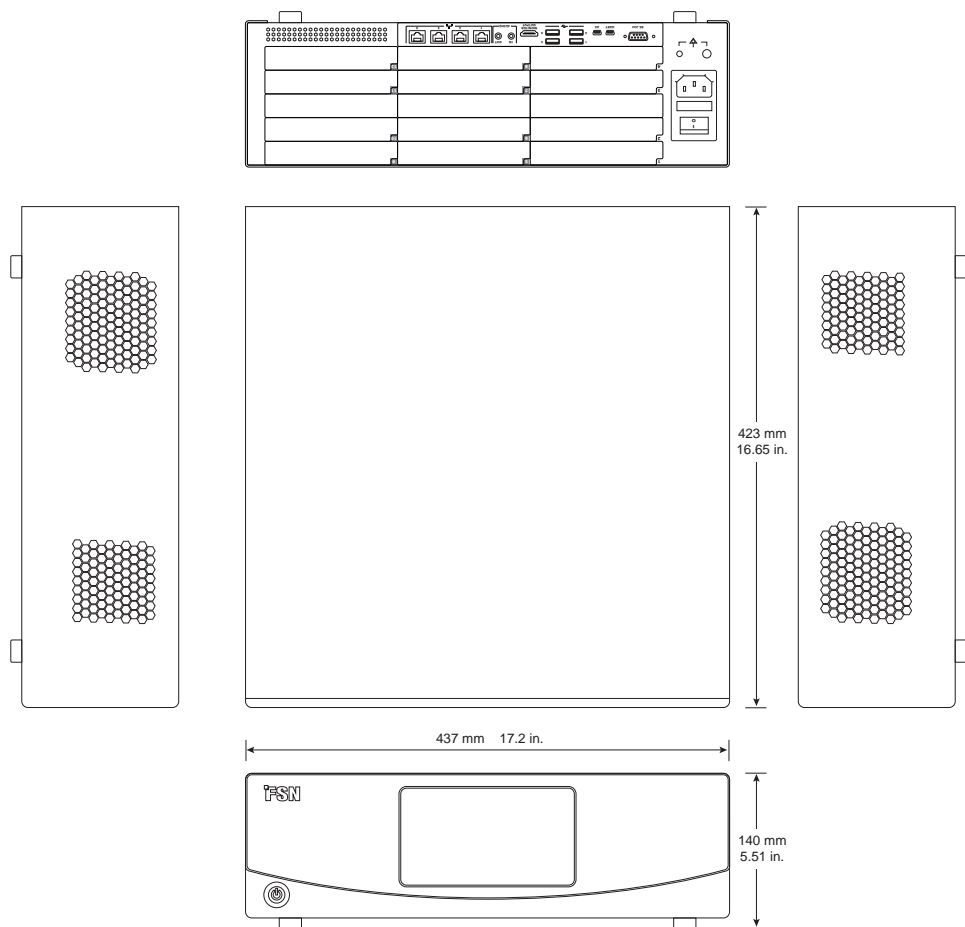

Tisztítási utasítások



Tartsa be a kórházi protokollt a vér és testnedvek kezelésére vonatkozóan. Az eszközt enyhe tisztítószer és víz hígított keverékével tisztítsa meg. Használjon puha pamut törlőruhát vagy törlőkendőt. Bizonyos tisztítószerek használata károsíthatja a termék címkeit és műanyag alkatrészeit. A szer megfelelőségéről érdeklődjön a tisztítószer gyártójánál. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.

1. Tisztítsa meg a készülékházat egy, az orvosi berendezésekhez jóváhagyott tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha pamutkendővel.
2. Ismétlje meg a tisztítást kizárólag vízzel.
3. Törölje szárazra egy száraz ruhával.

A készülékházat a következő termékekkel szembeni ellenállóság szempontjából tesztelték:

- Virex használatra kész fertőtlenítő tisztítószer
- Misty Clear Lemon 10 fertőtlenítőszer
- Misty univerzális fertőtlenítő tisztítószer
- Misty univerzális fertőtlenítő tisztítószer II
- Zep Heavy-duty üveg és egyéb felülettisztító szer
- Klear Screen
- Screen TFT (Kontakt Chemie)
- Incidin Foam (Ecolab)
- Microzid
- Enyhe tisztítószer
- Izopropil-alkohol <5%-os koncentrációban
- Háztartási fehéritőszer (általános nátrium-hipoklorit, 5,25%-os nátrium-hipoklorit oldatok 1:10-1:100 arányú vízzel hígítva)
- Precise Hospital Foam Cleaner fertőtlenítőszer


Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Szerviz

Termékinformációért vagy segítségért forduljon az alább felsoroltak közül a megfelelő ügyfélszolgálathoz.

Garancia

Egy év, alkatrészekre és munkára.

 EK képviselő

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Németország

Tel: +49(0)6196-887170



FOREESEON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Németország

Tel.: +49(0)6104-643980



FOREESEON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Egyesült Királyság

Tel. +44-(0)208-546-1047



FOREESEON KOREA

B-408, U-Space2, 670 Daewangpangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. +82-31-8017-0780



FOREESEON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 8E, No. 89 Building

1122 North Qinzhou Road

Xuhui, Shanghai 200233, China

Tel: 86-21-6113-4188



FSN™

FOREESEON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA

Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2062 1/2022 Rev. - 7/2023

A specifikációk előzetes értesítéssel vagy anélkül változhatnak.



www.fsnmed.com